



User Manual



KIT FOR
AUTOMATIC/HANDS
FREE TREATMENT

WIR DANKEN IHNEN, DASS SIE SICH FÜR EIN GLOBUS-GERÄT ENTSCIEDEN HABEN. SOLLTEN SIE SPEZIELLE FRAGEN HABEN, STEHEN WIR IHNEN JEDERZEIT ZUR VERFÜGUNG.



DOMINO s.r.l. - Via Vittorio Veneto, 52 - Codognè - TV - Italien
Tel. (+39) 0438.7933 - Fax. (+39) 0438.793363 - e-mail: info@globusitalia.com

TECHNISCHE DATEN

Das automatische Behandlungsset besteht aus einer Serie aus Zubehörteilen, die zur Durchführung der Behandlungen im automatischen Modus nützlich sind. Alle Zubehörteile des Sets können auch separat erworben werden.

Resistives und neutrales Kabel (A-Kabel) für die Verbindung zwischen Gerät und fester Elektrode mit Steckverbindung (Ø 4 mm).



Kleines Kabel, das als Adapter dient, um die Verbindung zwischen der Steckverbindung des A-Kabels und der Hafelektrode (2 mm) herzustellen. Resistiv und neutral.



Y-Kabel, das die Verbindung von zwei kleinen Adapterkabeln mit Ø 4 mm-Anschluss mit dem A-Kabel ermöglicht. Das Y-Kabel ist nützlich, wenn Sie für jeden Ausgang mehr als zwei Hafelektroden verwenden möchten (zwei resistive und zwei neutrale).



2 Packungen mit Hafelektroden. Abmessungen 7,5 × 13 cm.



Elastisches Band mit Klettverschluss zur besseren Fixierung der Elektroden am Patienten. Abmessungen 80 x 800 mm.



Weiche Tasche zur Aufbewahrung von Kabeln und Elektroden.



Nutzungsbedingungen

Temperatur: von 5°C bis 35°C

Maximale relative Luftfeuchtigkeit: von 20% bis 80%

Luftdruck: von 700hPa bis 1060 hPa

Lager- und Transportbedingungen

Temperatur: von 5°C bis 35°C

Maximale relative Luftfeuchtigkeit: von 20% bis 80%

Luftdruck: von 700hPa bis 1060 hPa

Entsorgung

Entsorgen Sie das Erzeugnis in einem spezialisierten Zentrum und auf jeden Fall unter Beachtung der in Ihrem Land geltenden Regelungen.

Die richtige Mülltrennung oder die Beachtung der oben genannten Punkte tragen zur Vermeidung von möglichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit bei und fördern die Wiederverwertung bzw. das Recycling von Materialien, aus denen das Gerät besteht.

Garantiebedingungen

Das Zubehör für das Set ist ausschließlich für die Verwendung mit den von Domino Srl hergestellten und in den Gebrauchsspezifikationen des Sets angegebenen Geräten konzipiert und entwickelt. Eine Verwendung des Produkts, die von den Angaben in dieser Anleitung abweicht, macht die Produktgarantie ungültig und befreit den Hersteller von jeglicher Haftung für direkte und/oder indirekte Schäden.

Ab dem Kaufdatum hat das Zubehör für den ersten Benutzer eine Garantie von 6 Monaten. Die Garantie deckt Herstellungsfehler und fehlerhafte Materialien mit Ausnahme von Verbrauchsmaterialien wie Elektroden ab.

Um die Garantie zu nutzen, muss der Benutzer die folgenden Garantieklauseln beachten:

1. Die Produkte müssen von und auf Kosten des Kunden in der Originalverpackung und mit vollständigem Originalzubehör verschickt werden. Außerdem deckt die Garantie keine Schäden ab, die während des Verkehrs aus Verwendung von nicht geeigneten Verpackungen entstanden sind (siehe Absatz 1).
2. Die Garantie für das Produkt unterliegt der Vorlage eines Steuerbelegs (Quittung oder Verkaufsrechnung), der das Kaufdatum des Produkts bestätigt.
3. Die Reparaturarbeiten haben keinen Einfluss auf das ursprüngliche Gewährleistungsdatum und weder erneuern noch verlängern sie es.
4. Die Garantie deckt nicht die Unmöglichkeit der Verwendung des Produkts, andere Neben- oder Folgekosten oder sonstige Kosten, die dem Käufer während der Produktreparatur entstehen, ab.

VERWENDUNGSZWECK

Das Produkt ist nicht für den Hausgebrauch bestimmt und wurde für den Einsatz in folgenden Betriebsumgebungen konzipiert:

- Kliniken;
- Zentren für Physiotherapie;
- Rehabilitation im Allgemeinen;
- Schmerzbehandlungen im Allgemeinen

Die Verwendung des Geräts ist Ärzten und Physiotherapeuten gestattet.













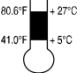
Produktkonformität

Das Gerät entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG, Anhang VII, die in Italien mit dem gesetzvertretenden Dekret Nr. 46 vom 24. Februar 1997, geändert durch die Richtlinie 2007/47/EG, übereinstimmt.

Produktrisikoklasse

Klasse I Regel 9 Anhang IX der EU-Richtlinie 93/42/EWG, geändert durch die Richtlinie 2007/47/EG.

KENNZEICHNUNG UND SYMBOLE

	Bezug auf den Hersteller
	Herstellungsdatum
	Dieses Symbol zeigt die vorgesehene Lager- bzw. Transporttemperatur des Produktes an
	Der Benutzer muss die Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Gerätes durchlesen
	Verpflichtendes Verfahren
	Druck der Transport- und Lagerumgebung des Geräts und seines Zubehörs.
	Feuchtigkeit der Umgebung, in der das Gerät und sein Zubehör gelagert und transportiert werden
LOT	Lotnummer
	Haltbarkeitsdatum des Produktes
	Die Verpackung kann als wiederverwertbarer Abfall entsorgt werden
	Dieses Symbol auf Ihrem Gerät zeigt an, dass es den geltenden Richtlinien entspricht
	Vorsicht
	Elektrodengrößen
	Lagertemperatur der Elektroden

VORBEREITUNG AUF DEN GEBRAUCH

Hinweise vor dem Gebrauch

Die Energieübertragung im Automatikmodus erfordert einige Vorsichtsmaßnahmen und muss vom Betreiber ausgeführt werden. Wenn kein Betreiber anwesend ist, kann die automatische Behandlung nicht am Patienten durchgeführt werden. Während der Behandlung ist es sehr wichtig, dass die Elektroden auf der Haut des Patienten haften. Wir empfehlen daher, die elastischen Klettverschlussbänder zu verwenden, um sie zu fixieren. Es ist möglich, zwei Bänder zu verwenden, um größere Bereiche abzudecken.

Auspacken

Die Verpackungen des Zubehörs müssen aufbewahrt werden, um die Verpackung während des Gebrauchs neu zusammenzustellen. Aus diesem Grund muss beim Herausnehmen von Komponenten deren Integrität

überprüft werden. Das Zubehör wird nicht in sterilen oder versiegelten Verpackungen aufbewahrt, außer Gel-Scheiben. Es ist daher ratsam, es vor dem Gebrauch zu reinigen.

Mögliche Verbindungen

Um das "Hands Free Kit" mit nur zwei Elektroden zu verwenden, stellen Sie die Verbindung wie in der Abbildung unten dar:



Wenn Sie 4 Elektroden anschließen möchten, um die zu behandelnde Oberfläche zu erweitern, müssen Sie das Y-Kabel verwenden. Die Konfiguration sieht dann wie folgt aus:



Lagerung und Wartung während der Nutzungszeit

- Putzen Sie die Kabel nur mit einem mit Desinfektionsmittel angefeuchteten Tuch oder in destilliertem Wasser aufgelösten quartären Ammoniumsalzen in Höhe von 0,2-0,3%. **Gießen Sie die flüssige Lösung nicht direkt auf die Oberflächen.** Am Ende der Reinigung muss das Zubehör mit einem sauberen Tuch vollständig getrocknet und in die Verpackung zurückgelegt werden.

Legen Sie die selbstklebenden Elektroden in die entsprechende Box und schließen Sie die Kunststoffverpackung.

Verwenden Sie das Zubehör immer mit sauberen Händen.

Verpackung für Transport oder längeren Gebrauch

Für einen besseren Schutz der Komponenten ist es sinnvoll, die Anweisungen des Abschnitts "Lagerung und Wartung während der Nutzungszeit" zu befolgen. Legen Sie daher alles in die Originalverpackung, in den Umgebungen, die im Abschnitt "Lager- und Transportbedingungen" beschrieben sind.

Sicherheitsvorkehrungen

Der Betreiber muss sicherstellen, dass der Patient immer wach und kollaborativ ist, um sofort übermäßige Hitzeempfindungen, die zu Verbrennungen führen können, mitteilen zu können.

Vor Beginn der Behandlung muss der Betreiber sicherstellen, dass der Patient in der Lage ist, seine Hitzeempfindlichkeit anzuzeigen.

Es wird empfohlen, die behandelten Punkte (Rötung, Geschwüre, Verbrennungen, ...) alle 3-4 Minuten visuell zu kontrollieren. Überprüfen Sie das vom Patienten wahrgenommene Wärmeempfinden, um Verletzungen während der Behandlung zu vermeiden.

Während einer automatischen Behandlung ist es ratsam, an mittleren bis niedrigen Wärmeempfindlichkeitsschwellen zu arbeiten, um mögliche Verbrennungen zu vermeiden. Aus diesem Grund empfehlen wir, den Wert 4-5 auf der Temperaturwahrnehmungsskala nicht zu überschreiten. Überprüfen Sie immer visuell die Gewebereaktion während der Behandlung, auch wenn der Patient eine geringe Wärmeempfindung hat.

Bevor Sie eine der Elektroden abnehmen, pausieren Sie das Gerät oder schalten Sie die Leistung auf 0.

An den Produktkomponenten können weder Änderungen noch Manipulationen vorgenommen werden.

Sichere Funktion des Gerätes und des Zubehörs

Für maximale Sicherheit muss das Gerät gemäß den Regeln und Einschränkungen der Bedienungsanleitung verwendet werden.

Wenn die Elektroden, die Kabel oder die Anschlüsse Verschleiß oder Beschädigungen aufweisen, sollte das Gerät sofort ausgetauscht werden.

Es ist strengstens verboten, Komponenten zu verwenden, die nicht im Set enthalten sind oder vom Hersteller nicht ausdrücklich als setkompatibel erklärt wurden.

Stimulieren Sie Elektroden oder Kabel nicht mechanisch.

Persönlicher Schutz

Tragen Sie keine Elektroden auf abgeriebenen oder verwundeten Bereichen auf.

Wenn möglich, rasieren, entfetten und trocknen Sie die Oberfläche, auf der die Elektroden platziert werden sollen.

Stellen Sie sicher, dass die Elektrodenoberfläche vollständig mit der Haut des Patienten in Kontakt steht.

Der Strom darf niemals quer durch den Körper oder die Brust fließen.

Das automatische Behandlungsset kann nur mit dem "Hands Free" -Programm von Rf Beauty 6000 Med und Diacare 5000 verwendet werden.

Kontraindikationen

- Rötung
- Hautreizung

ANWENDUNGSMETHODE

Der „Hands Free“ -Behandlungsmodus ist für Diacare 5000- und RF Beauty 6000 Med-Geräte verfügbar. Er bietet die Möglichkeit, die Elektroden statisch zu verwenden und auf der Haut des Patienten zu befestigen. Die Energie wird übertragen, ohne das Handstück direkt zu bewegen. Um eine übermäßige Erwärmung des Gewebes zu vermeiden, wurde eine modulierte Energieemission angenommen. Diese Methode hat Intervalle zwischen einem Impuls und dem anderen. Dies ermöglicht es, die Energie zu steuern, die dem Gewebe zugeführt wird.

Vorgeschlagene Wärmewahrnehmungsskala: Null entspricht keiner Empfindung und 10 entspricht einer brennenden Empfindung.

1	KEIN GEFÜHL VON WÄRME
2	WÄRME NUR GERING WAHRZUNEHMEN
3	LEICHTE WÄRME
4	LAUWARM
5	SEHR LAUWARM
6	HEIß
7	SEHR HEIß
8	ZU HEIß
9	VIEL ZU HEIß
10	BRENNEND

Verwendungsmethode

Das automatische Behandlungsset kann nur mit dem spezifischen "Hands Free" -Programm der Diacare 5000 und RF Beauty 6000 Med Geräten verwendet werden.

Die Energieübertragung im Automatikmodus muss kontinuierlich vom Betreiber überwacht werden. Wenn kein Betreiber anwesend ist, kann die automatische Behandlung nicht am Patienten durchgeführt werden.

Wenn der Patient vorbereitet ist und die Elektroden platziert sind, beginnen Sie die automatische Behandlung mit einer sehr geringen Intensität (etwa 5-10%). Bevor Sie die Intensität erhöhen, warten Sie einige Minuten, bis sich die Temperatur im behandelten Bereich stabilisiert hat. Überprüfen Sie bitte das vom Patienten wahrgenommene Wärmeempfinden und führen Sie die visuelle Kontrolle der behandelten Punkte (Rötung, Geschwüre, Verbrennungen usw.) durch. Erhöhen Sie die Intensität in Intervallen von 2-5%. Wiederholen Sie bei jeder Erhöhung die visuelle Kontrolle des behandelten Bereichs und überprüfen Sie die vom Patienten wahrgenommene Empfindung. Erhöhen Sie die Intensität weiter, indem Sie diese Überprüfung bei jeder Erhöhung durchführen, bis der gewünschte Wert erreicht ist.

Bitten Sie die behandelte Person an dieser Stelle (alle 3-4 Minuten), auf der Skala das empfundene Wärmeempfinden anzugeben. **Senken Sie die Temperatur oder pausieren Sie das Gerät sofort, wenn das Wärmeempfinden den Wert 6 der Skala überschreitet.**

GLOBUS

ITALIAN EXCELLENCE

DOMINO S.R.L. - Via Vittorio Veneto, 52 - 31013 Codognè (TV) - Tel. (+39) 0438.7933

globuscorporation.com | [YouTube](#) [in](#) [f](#) [@](#)